

# BANDELETTES DE CONTROLE DU TAUX D'ACIDE PERACETIQUE

## Pour solution activée d'ANIOXYDE 1000

### INDICATIONS

Contrôle du taux d'acide peracétique réactif au sein d'une solution de désinfection totale à froid ANIOXYDE 1000.

### MODE D'EMPLOI

- Utiliser la bandelette de contrôle pour validation de l'activité du bain :  
En début de séance ou à la reprise d'activité après interruption.  
Toutes les 4 heures d'activité consécutive (au-delà de 10 endoscopes par jour).  
En cas d'activité importante ou de conditions particulières (élévation de température...), il peut être nécessaire d'augmenter la fréquence d'utilisation de ces bandelettes.
- Tremper totalement la partie réactive de la bandelette, dans la solution à tester durant 1 seconde.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 10 secondes après trempage.  
Ne plus interpréter un résultat obtenu pour une lecture réalisée plus de 15 secondes après trempage.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Les bandelettes sont stables :

- 24 mois si elles sont stockées entre +2°C et 8°C.
- 90 jours après ouverture.

Conserver le flacon fermé afin de garantir la durabilité des bandelettes.

Date d'ouverture :


### INFO

La coloration jaune du bain d'Anioxyde 1000 indique que le mélange Activateur/Générateur vient d'être effectué MAIS n'indique pas une présence ou non d'Acide peracétique dans la solution.

**Seul le virage de la couleur de la bandelette est à prendre en compte.**

Bain coloré (jaune) ou non + virage (noir) de la bandelette

Couleur Bleue intense à noire,

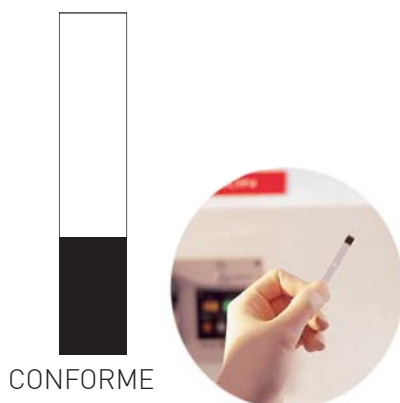

- Pas de couleur,  
- Evanescence rapide de la couleur,  
- Petits points,  
- Bordure colorée,

